


coflex™

coflex-F™



1. Расположение пациента

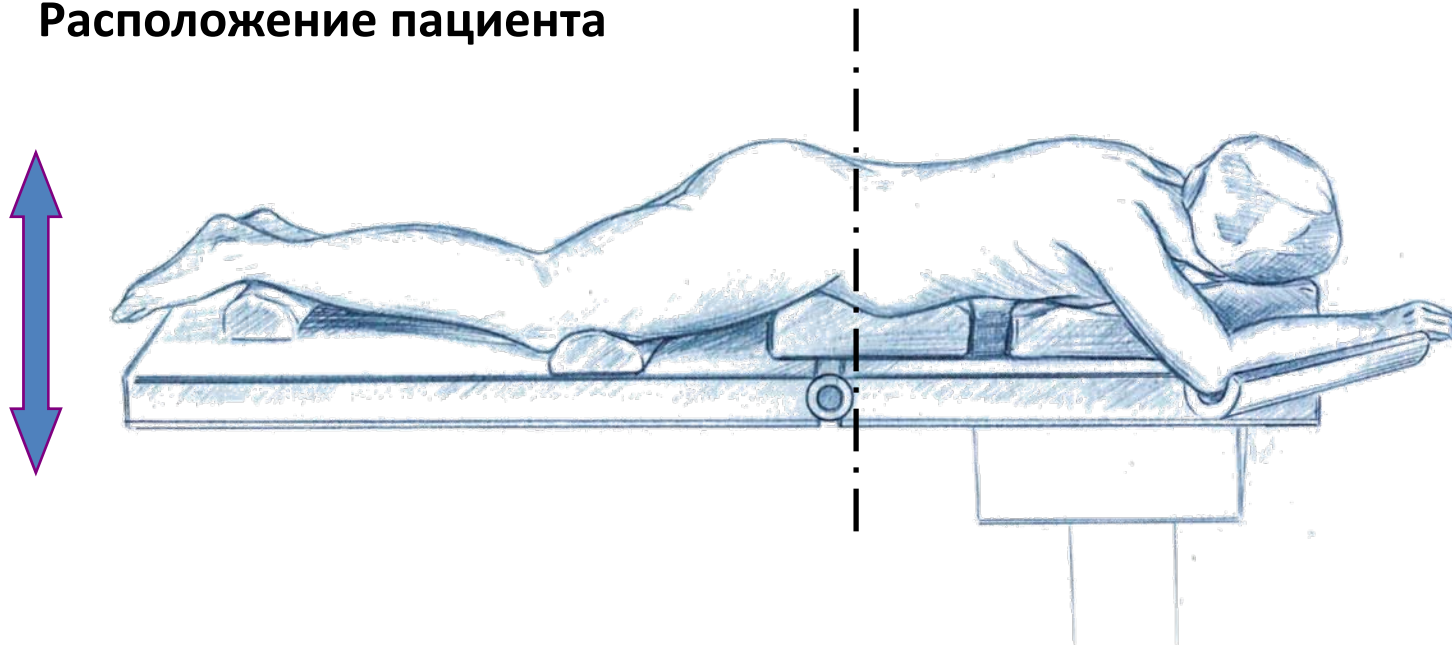


Пациент располагается на хирургическом столе таким образом чтобы избежать гиперлордоза на целевых участках позвоночного столба.

Для задней стабилизации **coflex-F** может быть выгодно достижение сагиттального выравнивания путем оптимального регулирования положения стола.

2. Доступ

Надостистая связка отсекается от остистых отростков, но не удаляется. Межостистая связка удаляется так же как и любые костные разрастания остистых отростков, которые могут помешать установке импланта ***coflex-F***.

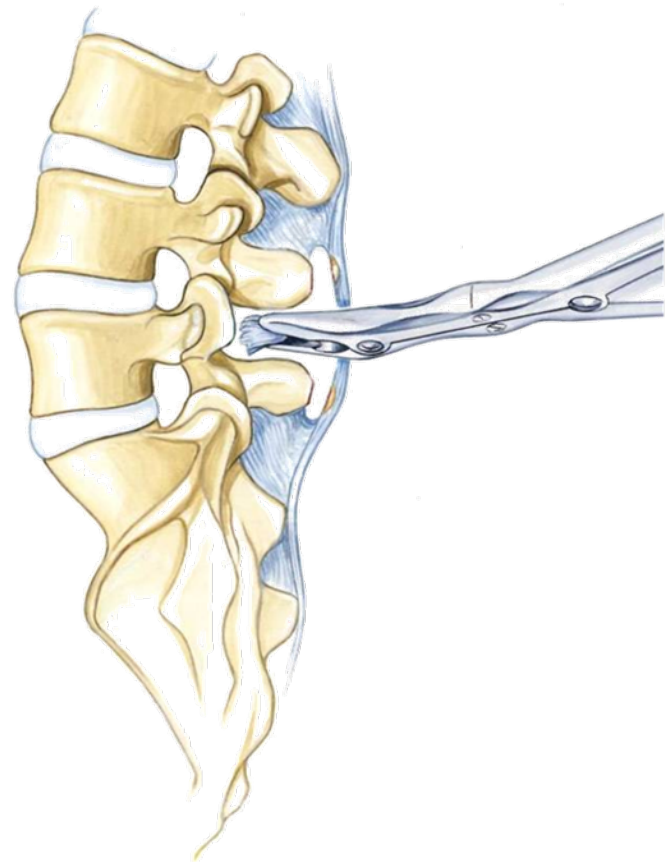

Задний поясничный межтеловой спондиллодез (PLIF)


Подготовка места установки

После того как кейдж PLIF установлен, используется тестовый компонент для определения размера импланта.



Тестовым компонентом оценивается надлежащий контакт с остистыми отростками и степень межкостистой и фасеточной дистракции.



Для оптимизации распределения нагрузки и обеспечения необходимого контакта импланта может потребоваться некоторая дополнительная резекция остистых отростков.

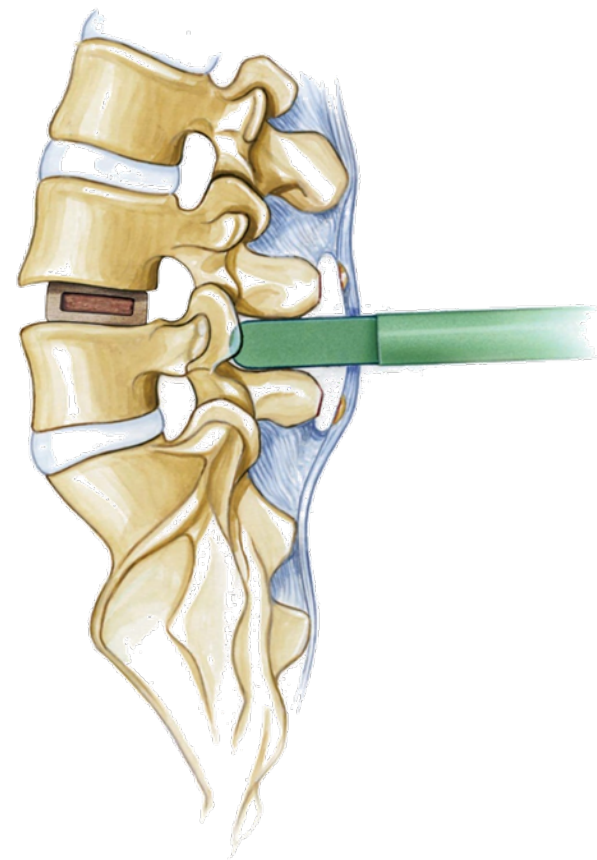

Установка импланта

Имплант **coflex-F** вставляется посредством импакции с использованием киянки.


Глубина погружения достаточна, если между твердой мозговой оболочкой и имплантом остается зазор 2-3мм.

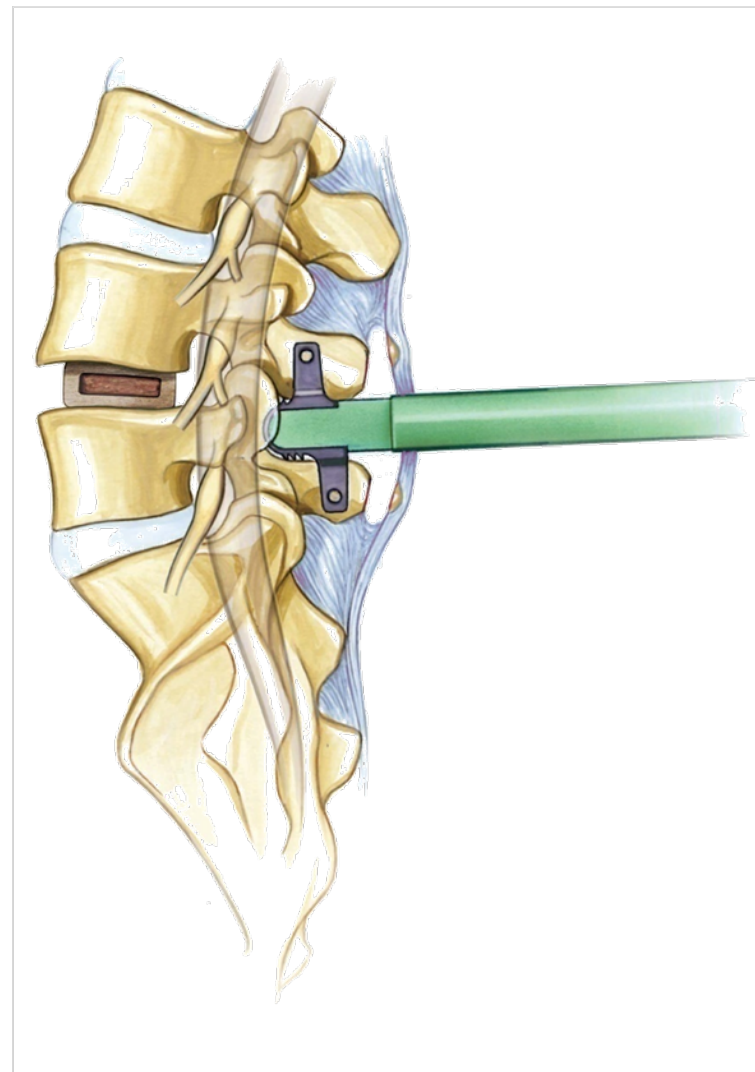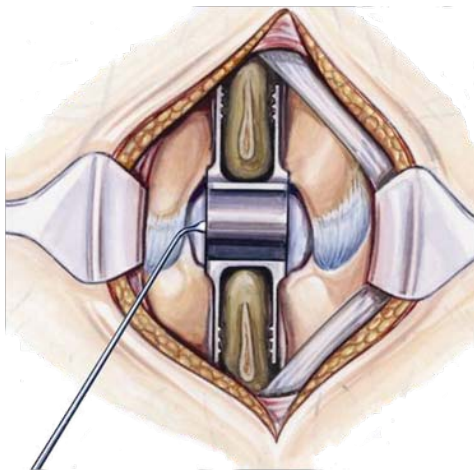

Установка импланта / Импакция *coflex-F*


Имплант *coflex-F* устанавливается глубоко в межостистое пространство.

После установки импланта, посредством сильного сжатия щипцов сделайте отверстия в остистых отростках для последующего введения винтов *coflex-F*.

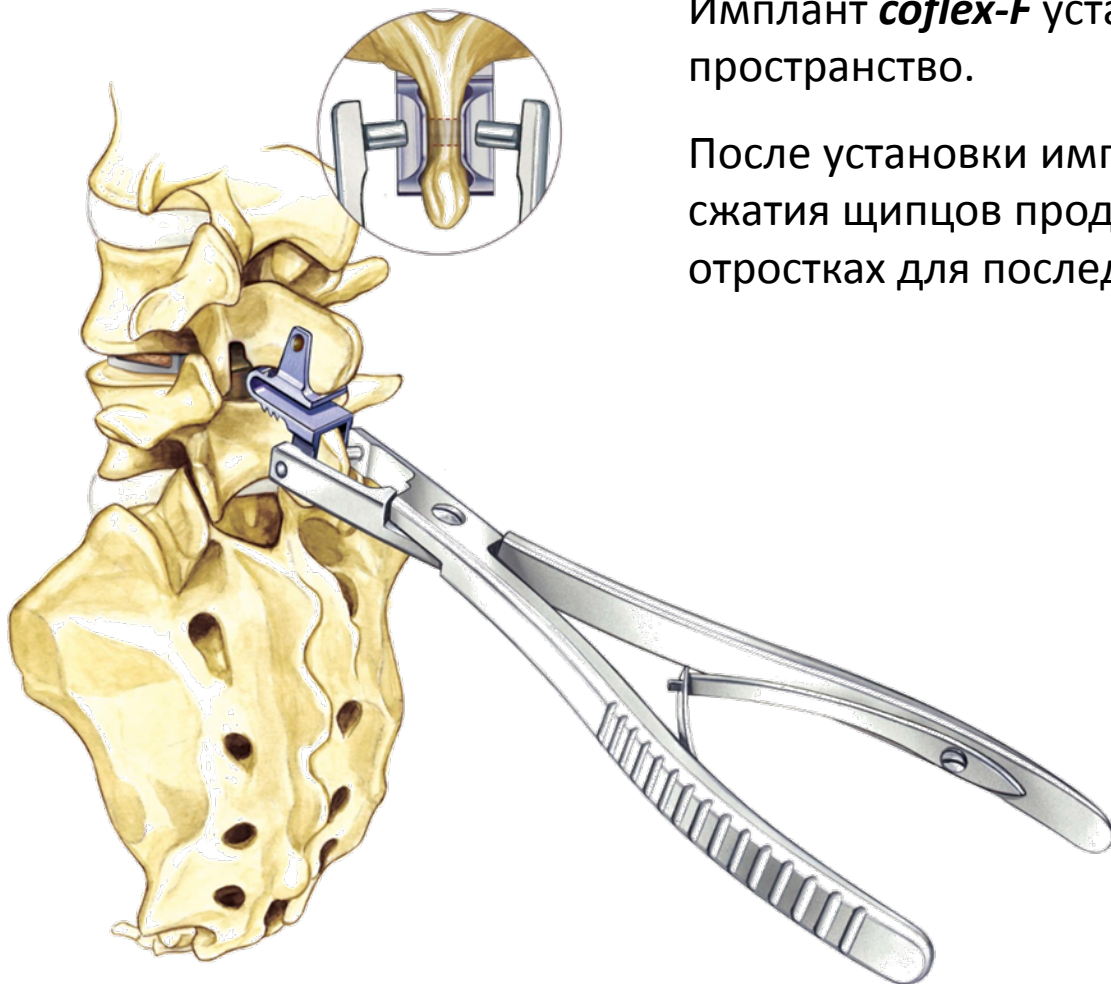

Установка импланта / Импакция *coflex-F*



Перед установкой винтов *coflex-F* рекомендуется прочистить отверстия зондом.

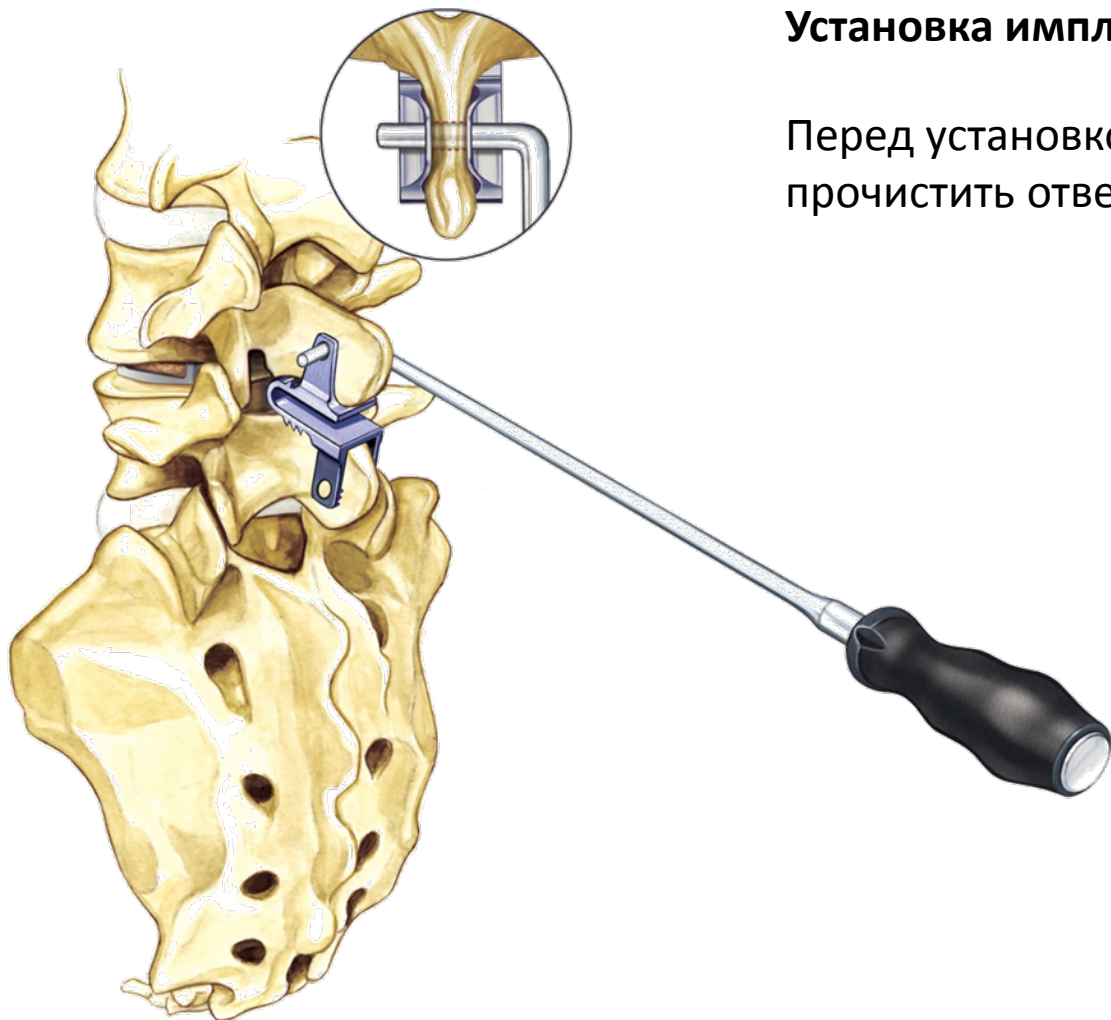

Установка импланта / Импакция *coflex-F*

Винты *coflex-F* устанавливаются с использованием инструмента для установки винтов.

Для оптимальной фиксации к остистому отростку требуется максимально плотное обжатие отростка крыльями.

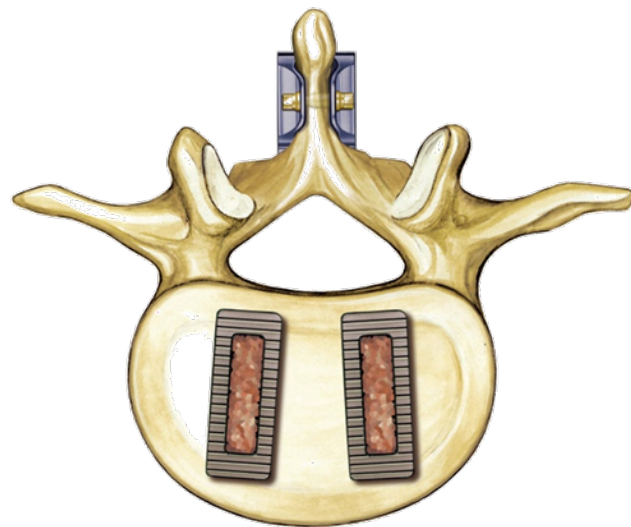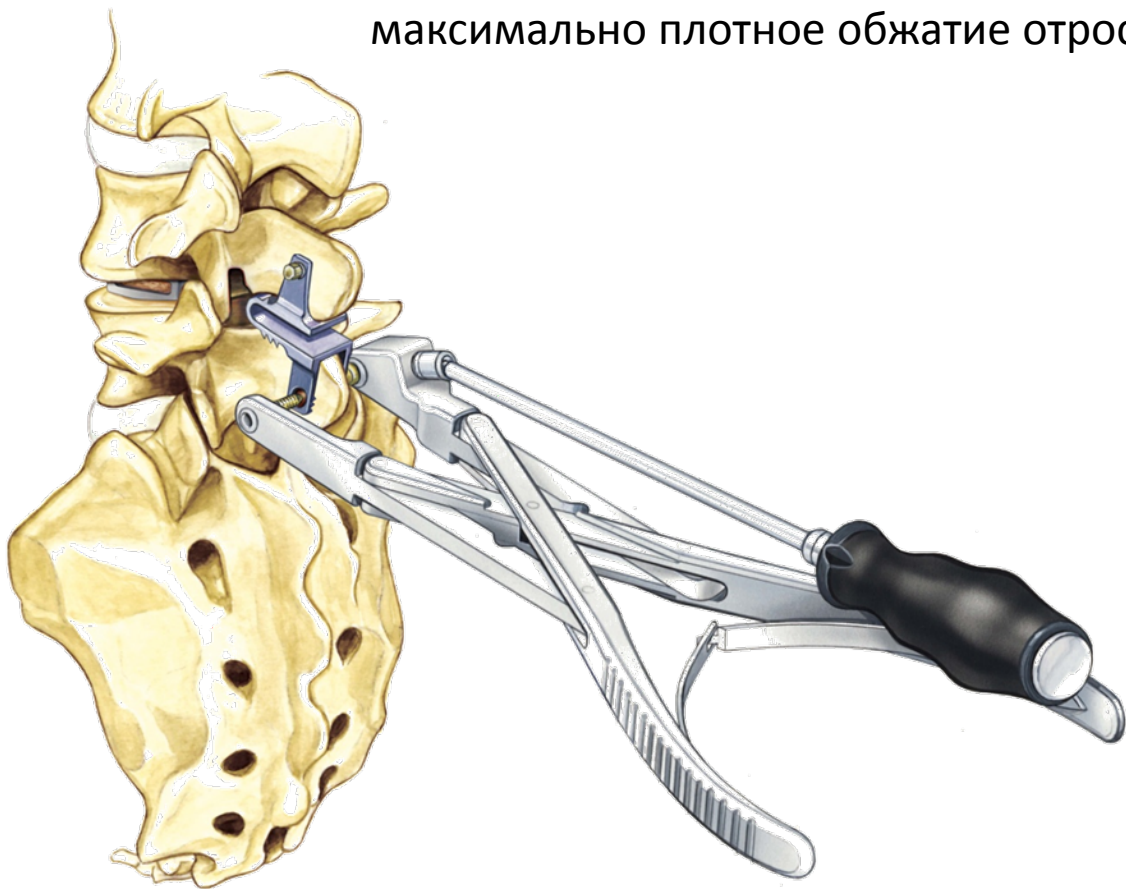

4. Ушивание раны

Дренажная трубка помещается согласно предпочтениям хирурга.

Надостистая связка снова прикрепляется к кости.

Кожа зашивается стандартным образом.

